

Program Pelatihan Digital Perawat Asing NSTC

Pedoman Operasional Standar Tabung Oksigen

Kartu Visual Klinis Dinamis
(SOP Visual Reference)

Panduan ini dirancang untuk referensi cepat.
Harap mengikuti langkah secara berurutan untuk
memastikan keamanan pemberian oksigen.



Empat Modul Utama Prosedur Operasi



Persiapan (Prep):
Menstabilkan tabung
dan melakukan
penyelarasan



**Pemasangan
(Install):**
Mengencangkan
flow meter



**Pengaturan
(Regulate):**
Membuka katup
dan membaca nilai



**Pemberian oksigen
(Oxygenate):**
Menghubungkan
perlengkapan dan
memasang tanda
keselamatan

**Setiap langkah merupakan titik kontrol keselamatan
independen dan tidak boleh dilewati.**




1. Menstabilkan tabung oksigen dengan kaki

Sebelum memasang flow meter, gunakan ujung kaki atau sisi kaki untuk menahan dasar tabung oksigen.

Untuk mencegah tergelincir atau jatuh, sehingga pemasangan dapat dilakukan secara tepat.



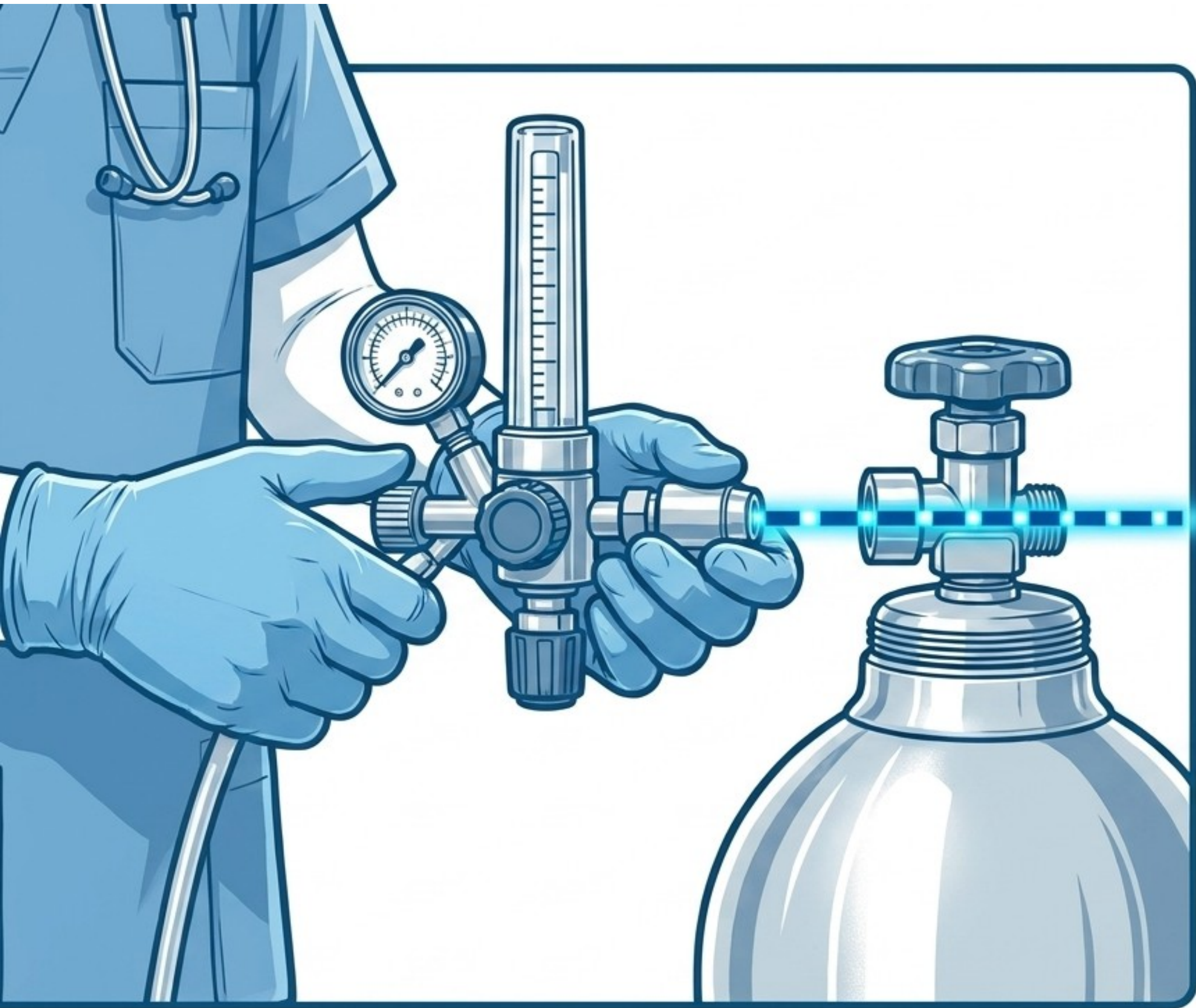

2. Menyelaraskan sambungan secara tepat

Arahkan flow meter secara lurus ke katup keluaran oksigen tabung



Pastikan sejajar lurus, jangan memasukkan secara miring agar tidak terjadi kebocoran.




3. Mengencangkan flow meter dengan benar

Putar searah jarum jam hingga tidak dapat diputar lagi.




Harus dalam kondisi benar-benar kencang sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya.

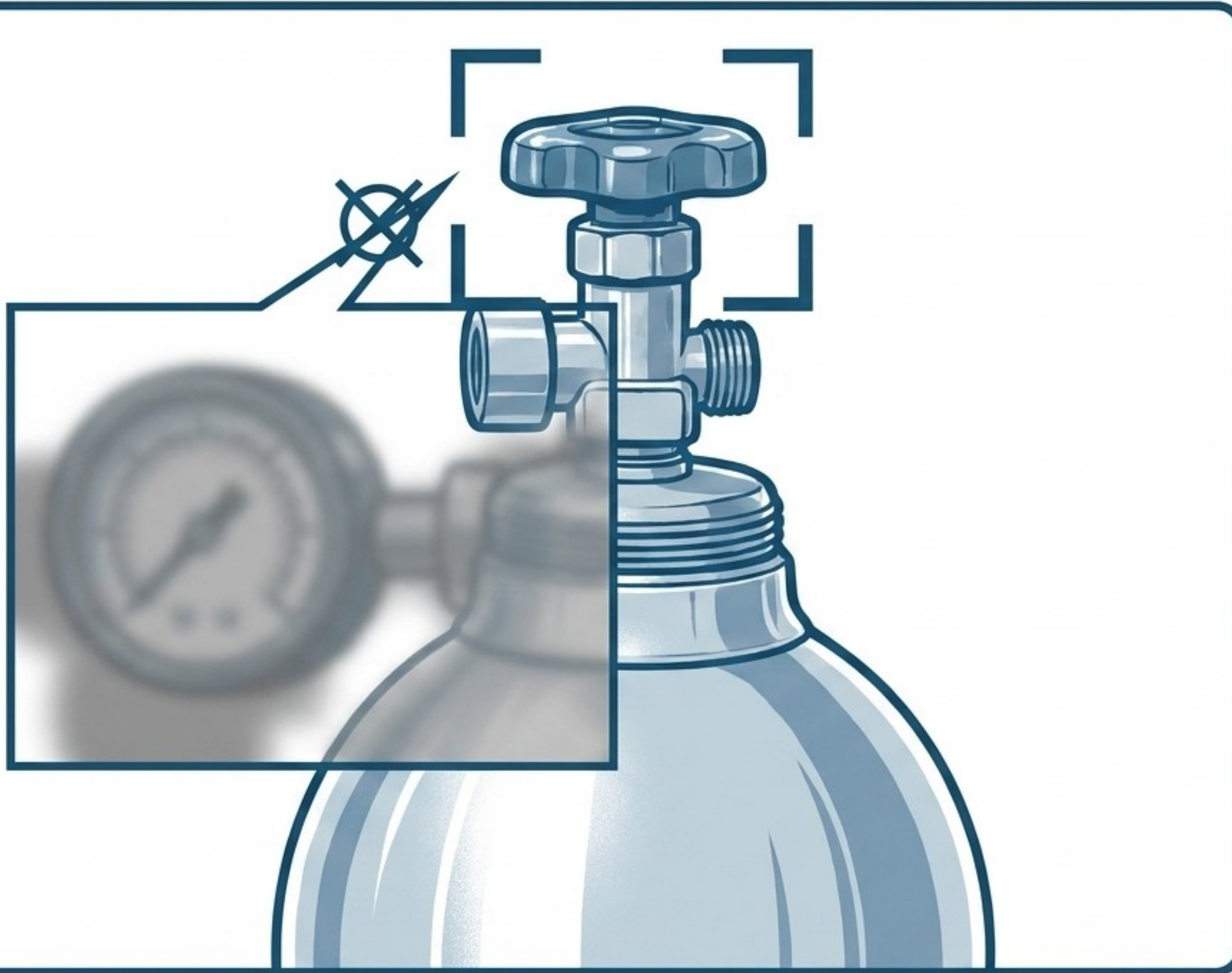

4. Membuka katup utama

Buka perlahan katup utama pada bagian atas tabung oksigen.

(Catatan: ini adalah katup utama di bagian atas, bukan flow meter)

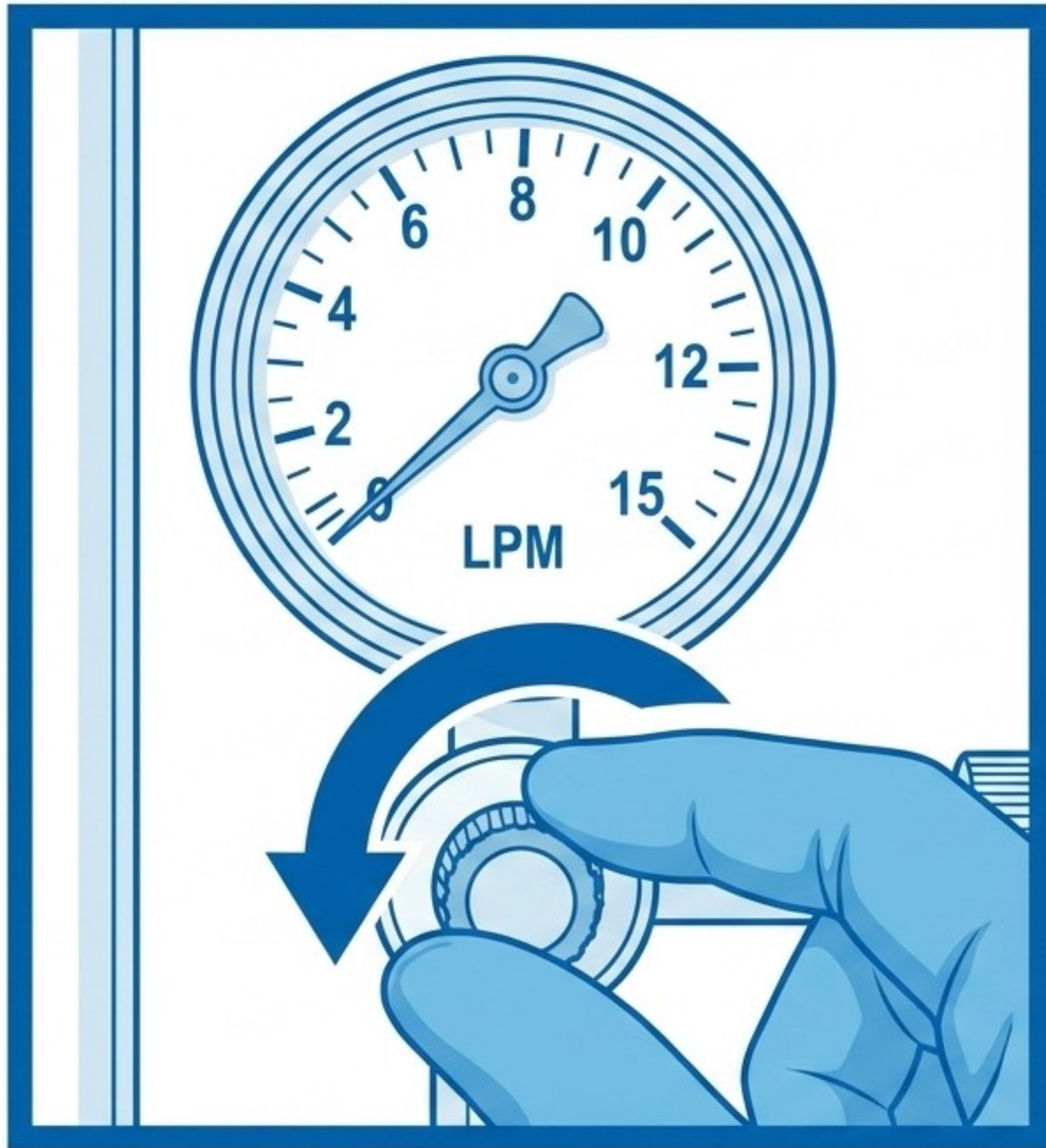


5. Mengatur dan menyesuaikan laju aliran

Putar skala pada flow meter di bagian depan.

Atur laju aliran sesuai instruksi dokter atau perawat.

Matriks Interpretasi Nilai Manometer

Visual	Status	Action
	Normal	Pasokan oksigen cukup, dapat digunakan dengan aman.
	Running Low	Harap waspada, siapkan tabung oksigen cadangan.
	Do Not Use	Tekanan habis, dilarang digunakan, segera ganti tabung!

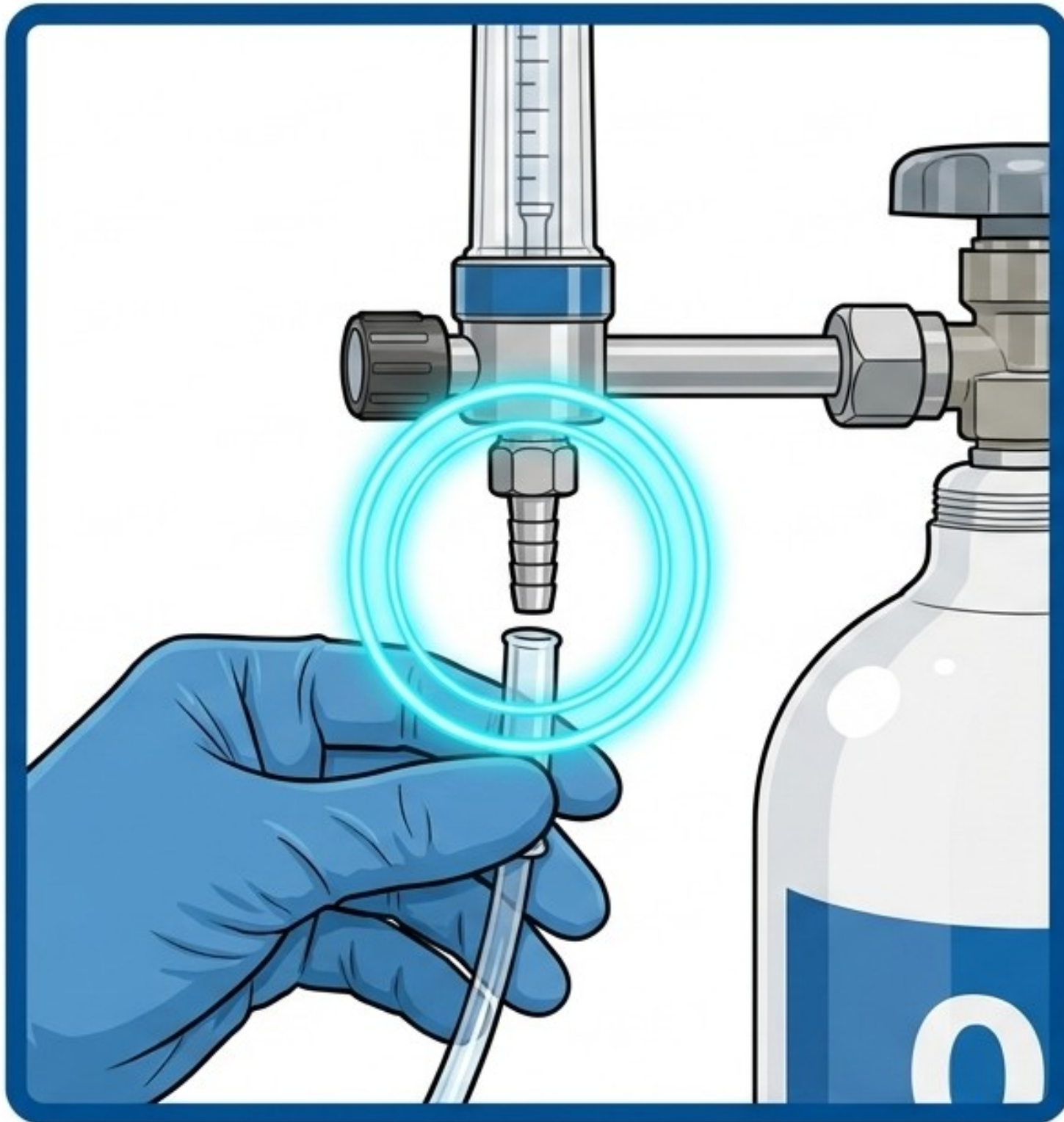

6. Menghubungkan perlengkapan oksigen

**Sambungkan kanul nasal
atau masker oksigen
dengan kuat ke port
keluaran oksigen.**



7. Pemasangan tanda dan posisi diam

Setelah semua siap, wajib menggantung tanda “Sedang Digunakan”.

Selama pemberian oksigen, dilarang memindahkan tabung oksigen!

Kartu Review Cepat 1 Menit (Before Duty Memory Path)



**Stabilkan
dengan kaki
(Foot Stabilize)**



**Kencangkan
dengan tangan
(Hand Tighten)**



**Baca indikator
hijau
(Read Green)**



**Pasang tanda
& diamkan
(Hang Sign &
Stop)**

Program NSTC – Kartu Visual SOP Klinis (Selesai)