

Chương trình đào tạo kỹ thuật số NSTC cho
người chăm sóc nước ngoài

Hướng dẫn vận hành tiêu chuẩn bình oxy

Thẻ tham chiếu thị giác lâm sàng
động (SOP Visual Reference)

Hướng dẫn này được thiết kế để tra cứu nhanh, hãy
thực hiện theo thứ tự để đảm bảo an toàn cung cấp oxy.



Bốn mô-đun quy trình vận hành



Chuẩn bị (Prep):
Cố định bình và
cẩn chỉnh



Lắp đặt (Install):
Siết chặt đồng hồ
lưu lượng



**Điều chỉnh
(Regulate):** Mở van
và đọc thông số



**Cung cấp oxy
(Oxygenate):**
Kết nối phụ kiện và
gắn biển báo an toàn


Mỗi bước đều là điểm kiểm tra an toàn độc lập, không được bỏ qua.

Bước 1: Dùng chân giữ chặt bình oxy

Trước khi lắp đồng hồ lưu lượng, nhất định phải dùng mũi chân hoặc cạnh chân chặn vào đáy bình.

Ngăn ngừa trượt và đổ ngã, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối cho các bước lắp đặt tiếp theo.



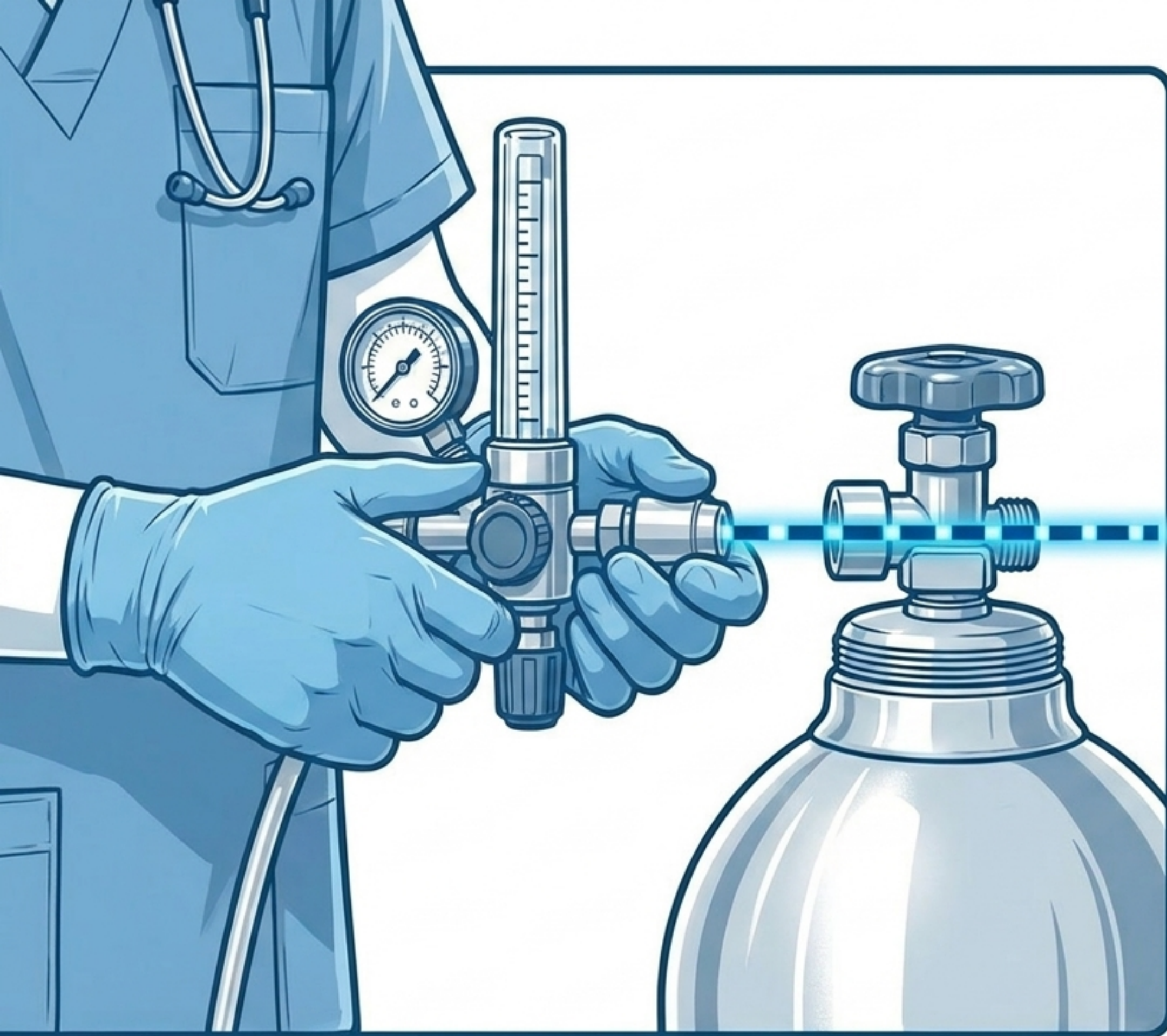


Bước 2: Căn chỉnh chính xác đầu nối

Đặt đồng hồ lưu lượng oxy thẳng hàng với đầu nối cổng ra oxy của bình.



Đảm bảo thẳng hàng ngang, tuyệt đối không cắm xiên, để tránh rò khí.

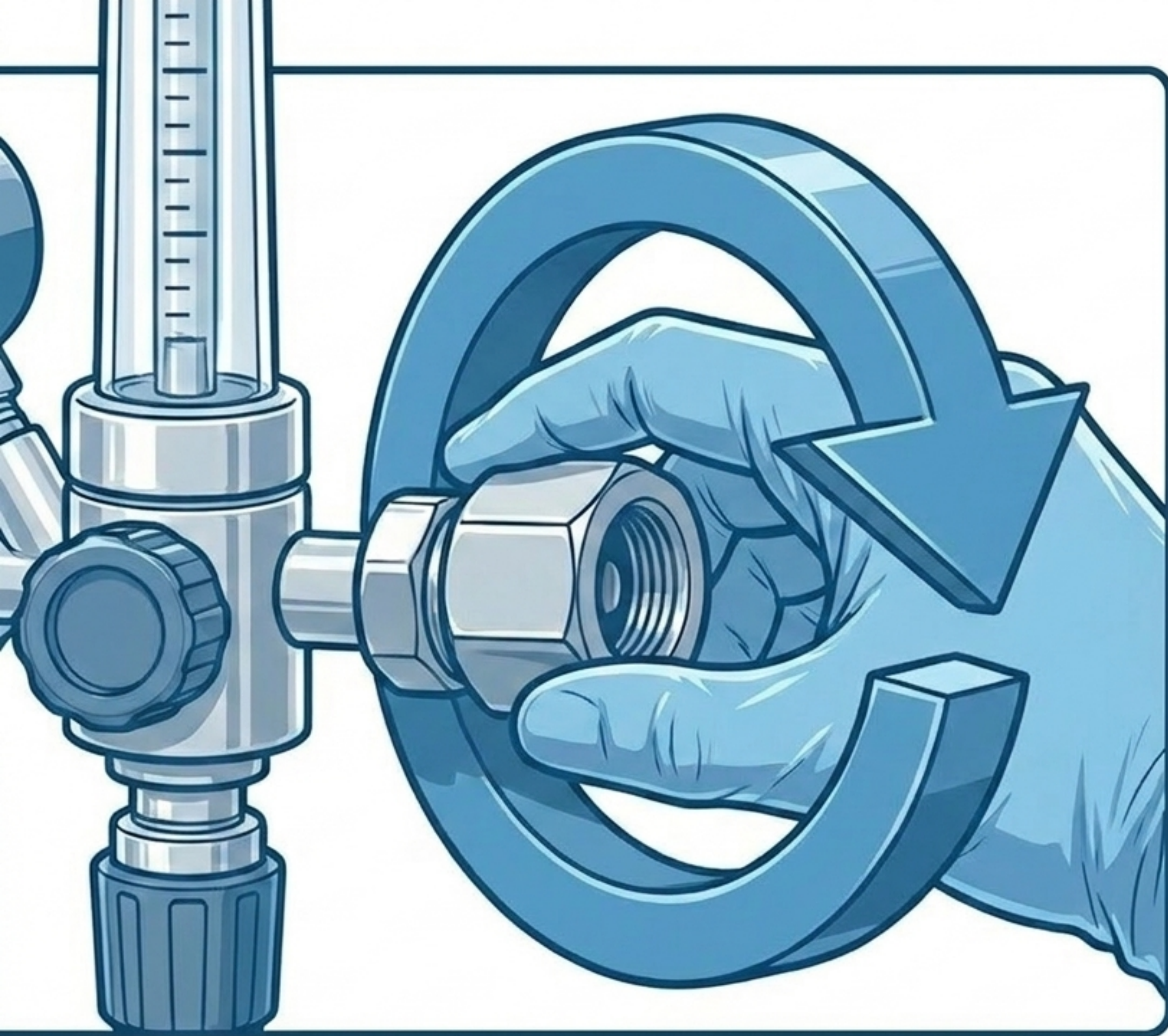


Bước 3: Siết chặt đồng hồ lưu lượng

Xoay theo chiều kim đồng hồ cho đến khi không thể xoay được nữa.




Phải đạt trạng thái “siết chặt hoàn toàn” mới được tiến hành bước tiếp theo.

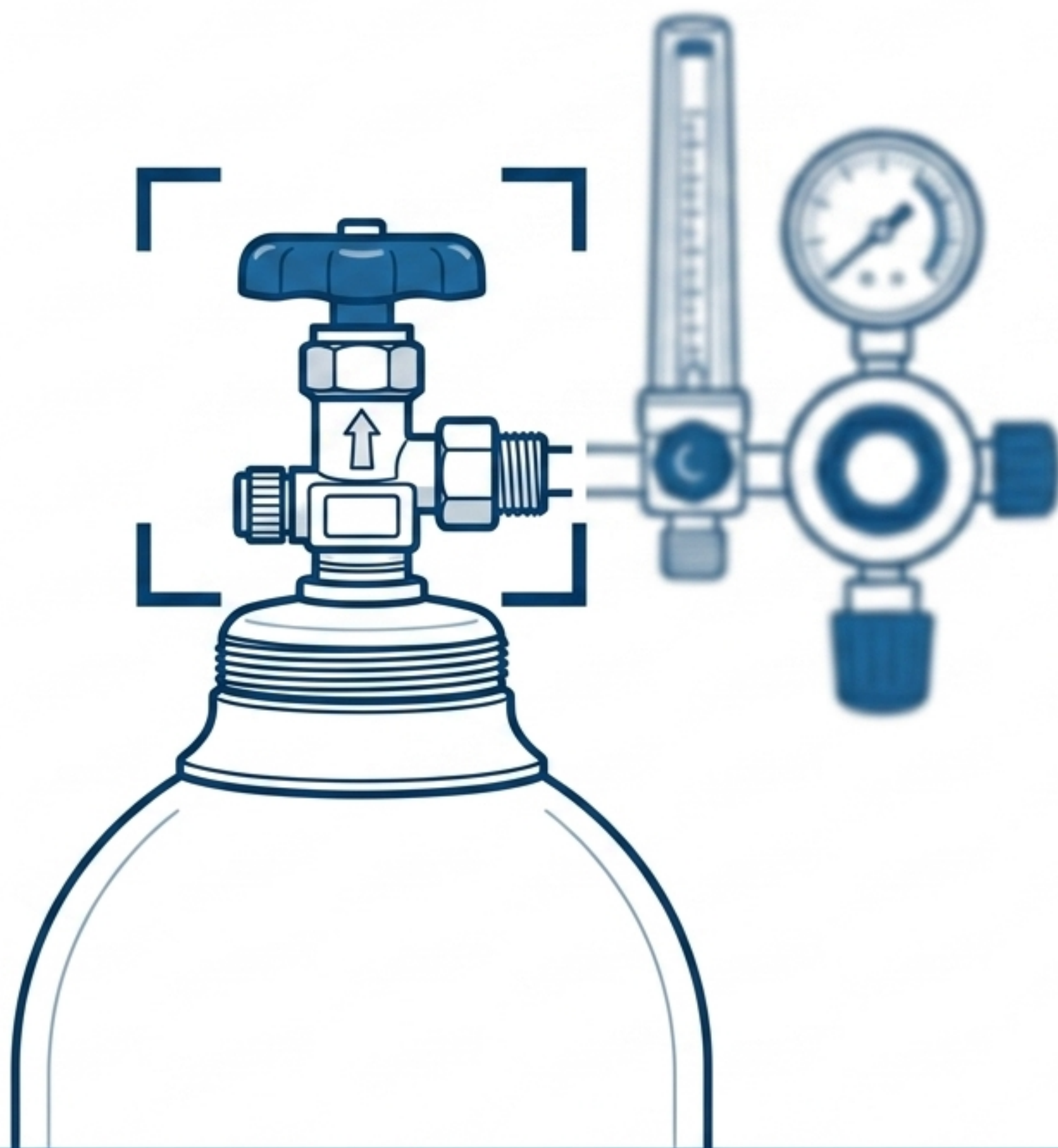

Bước 4: Mở van chính

Từ từ mở "van chính" ở trên đỉnh bình oxy.

(Lưu ý: Đây là van trên đỉnh, không phải đồng hồ lưu lượng)

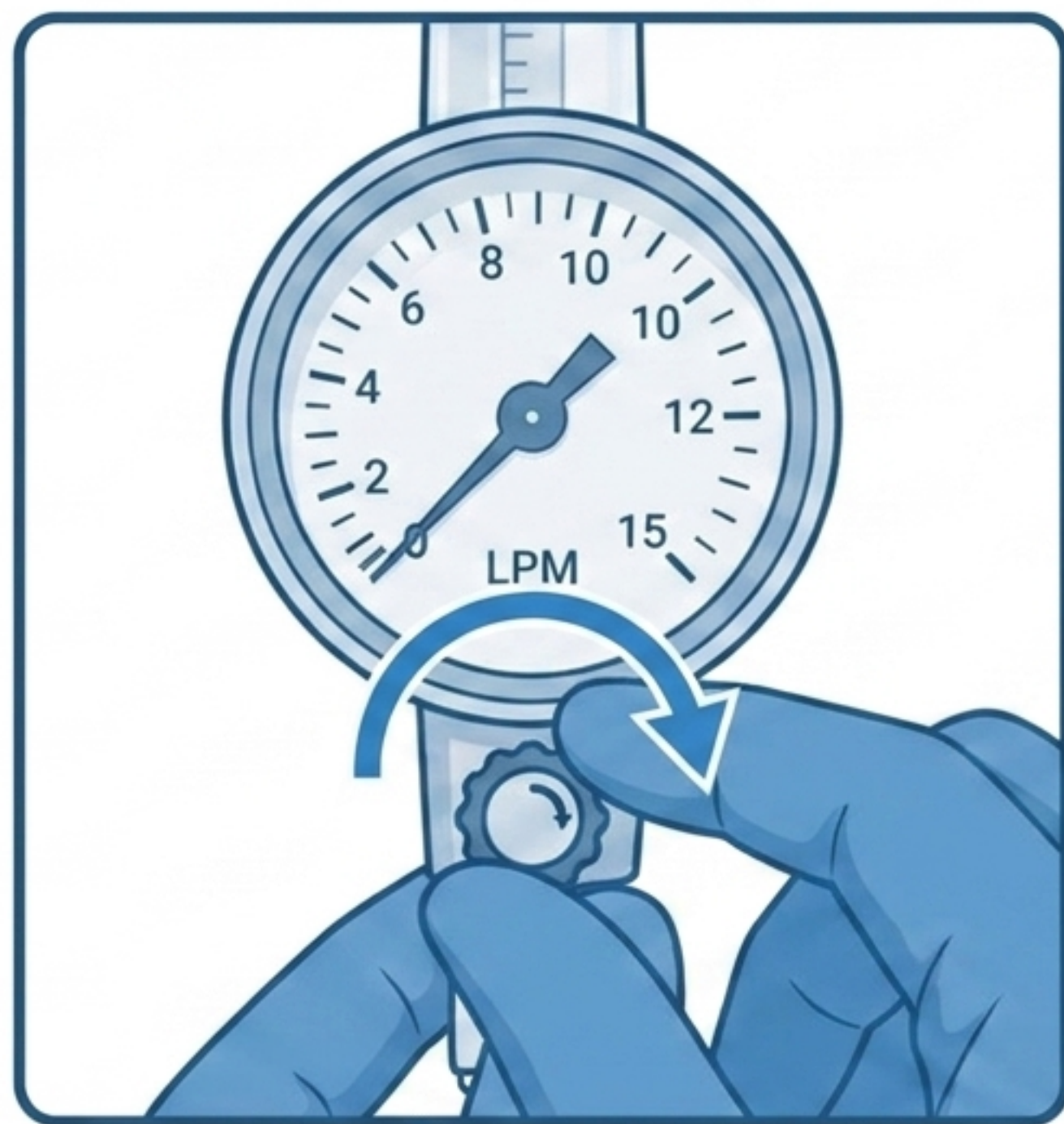


Bước 5: Mở và điều chỉnh lưu lượng

Xoay mặt số đồng hồ lưu lượng ở phía trước.

Theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc y tá, điều chỉnh lưu lượng về đúng giá trị.

Bảng đọc giá trị áp kế

Visual	Status	Action
	Bình thường (Normal)	Cung cấp oxy đủ, có thể yên tâm sử dụng.
	Sắp hết (Running Low)	Chú ý mọi lúc, chuẩn bị bình dự phòng.
	Không được dùng (Do Not Use)	Áp suất cạn kiệt, nghiêm cấm sử dụng, thay ngay!

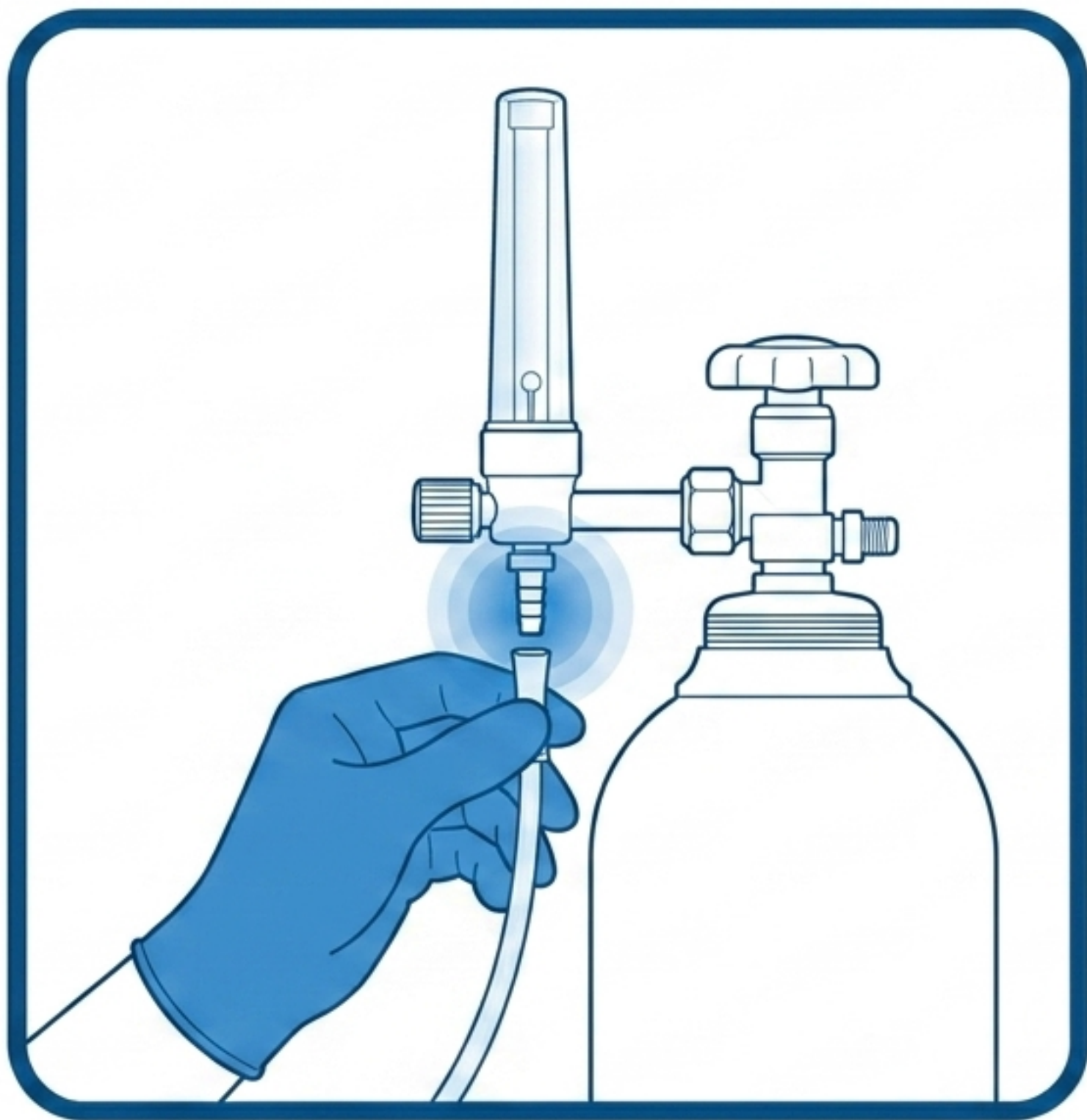

Bước 6: Kết nối phụ kiện oxy

Cắm chắc đầu nối ống thông mũi hoặc mặt nạ oxy vào bên dưới lỗ ra oxy.





Bước 7: Treo biển và để yên

Sau khi mọi thứ sẵn sàng, nhất định phải treo biển "Đang sử dụng" lên.

Trong khi đang cung cấp oxy, nghiêm cấm di chuyển bình!
(Do not move while in use)

Thẻ ôn tập nhanh 1 phút (Lộ trình ghi nhớ nhanh trước khi làm việc)

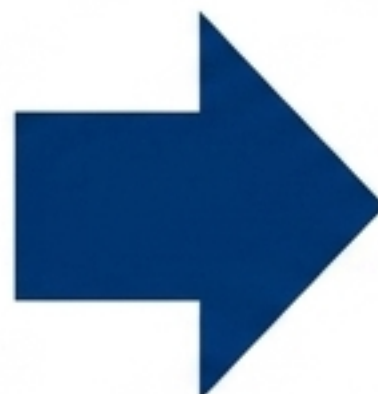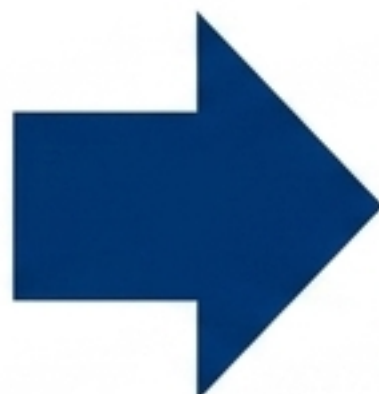

Dùng chân cố định
(Foot Stabilize)

Vặn chặt bằng tay
(Hand Tighten)

Đọc đèn xanh
(Read Green)

Treo biển để yên
(Hang Sign & Stop)

Chương trình NSTC – Hoàn thành thẻ tham chiếu thị giác quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) lâm sàng.