

國科會外籍照護員數位培訓計畫

氧氣鋼瓶標準 操作指引

臨床動態視覺字卡
(SOP Visual Reference)

本指引專為快速查閱設計，請依序執行確保供氧安全。



操作流程四大模組



準備 (Prep)
- 穩固鋼瓶與對準



安裝 (Install)
- 鎖緊流量表




調節 (Regulate)
- 開啟開關與
數值判讀



供氧 (Oxygenate)
- 連接耗材與
安全標示

每個步驟皆為獨立安全確認點，不可省略。

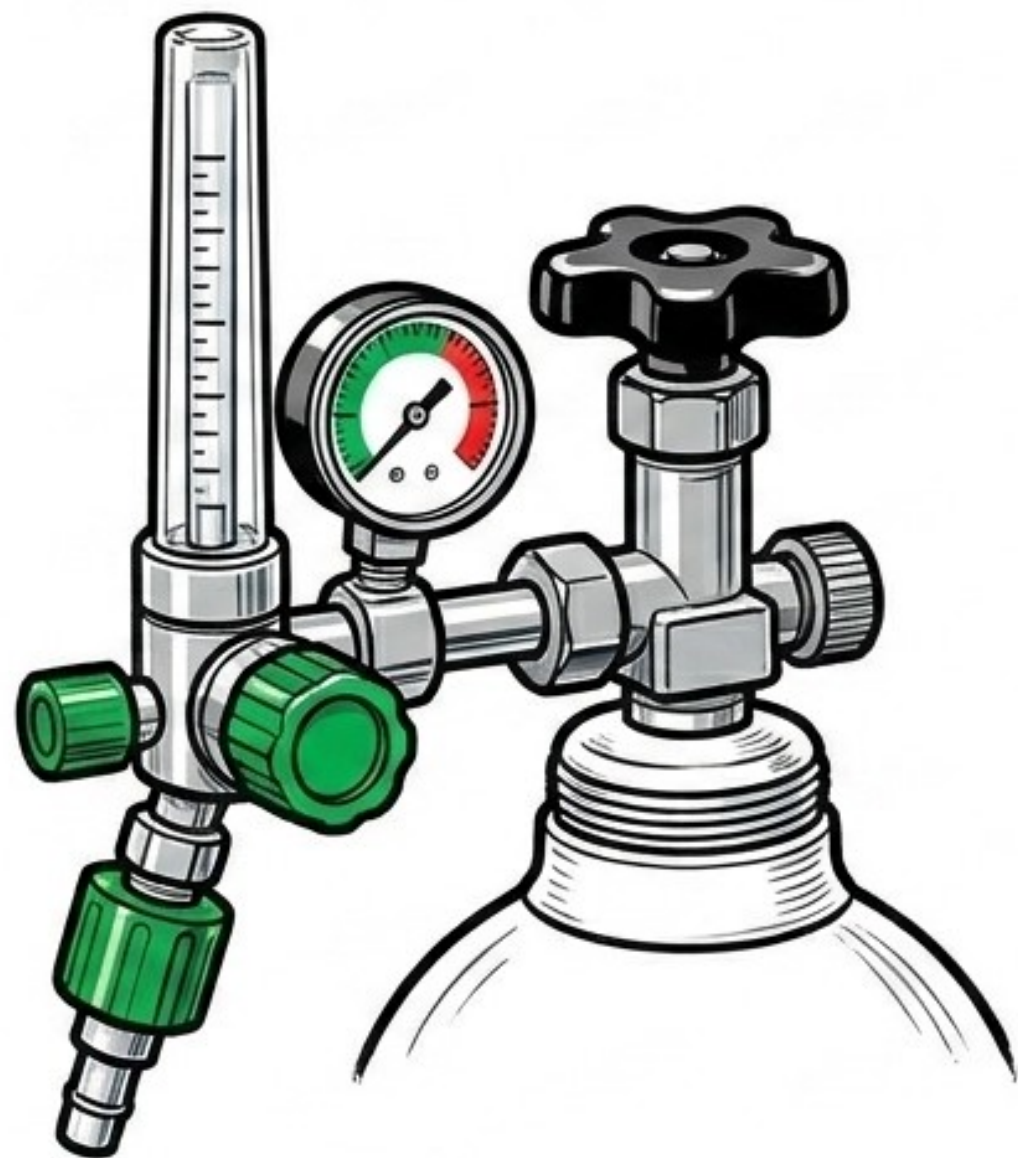


第一步：用腳穩住鋼瓶

安裝流量表前，務必用腳尖或腳側抵住鋼瓶底部。

預防滑動與傾倒，確保後續安裝的絕對精準。



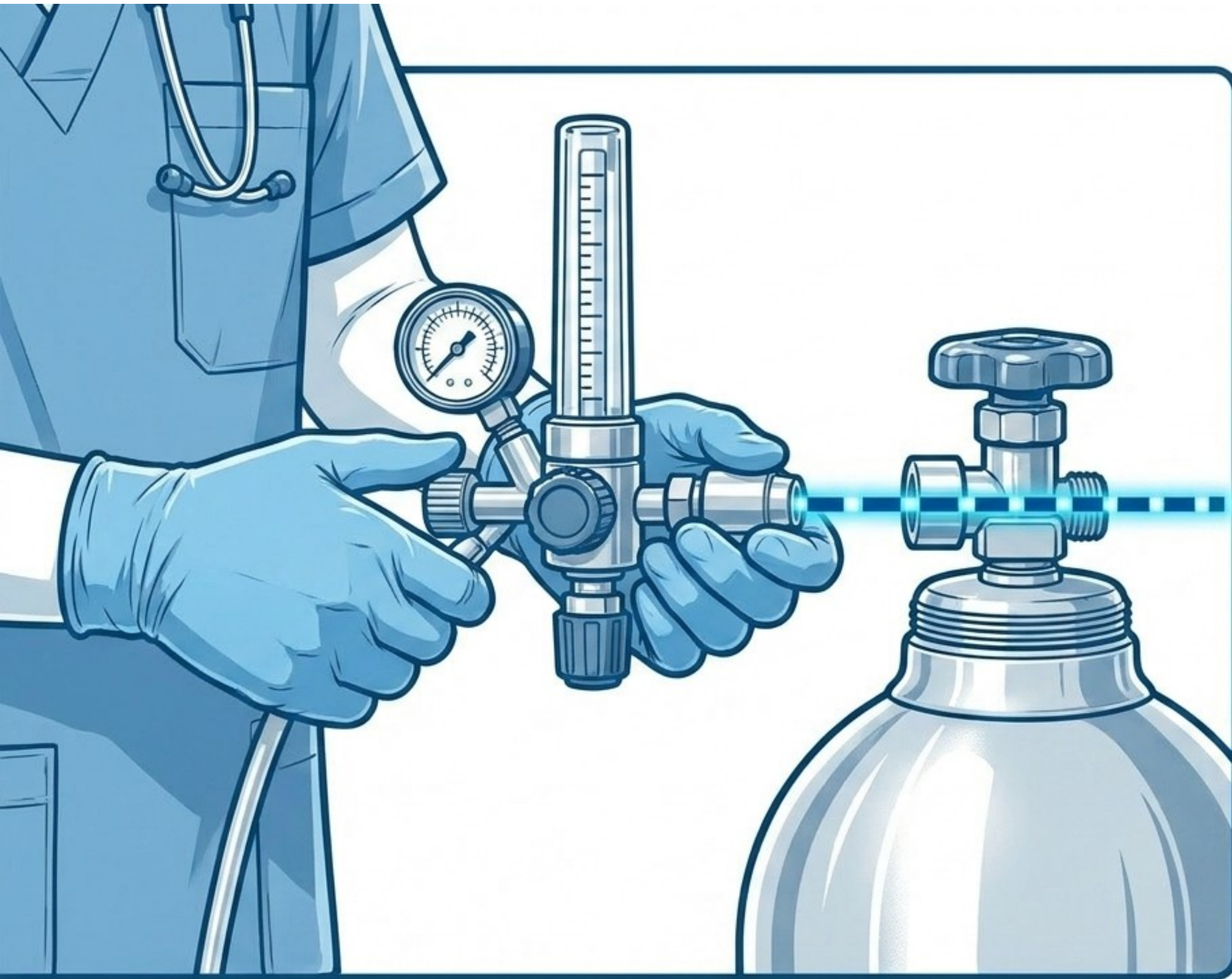


第二步： 精準對準接口

將氧氣流量表，筆直對準鋼瓶的出氧接口。

i

確保呈水平直線，切勿歪斜插入，以免漏氣。

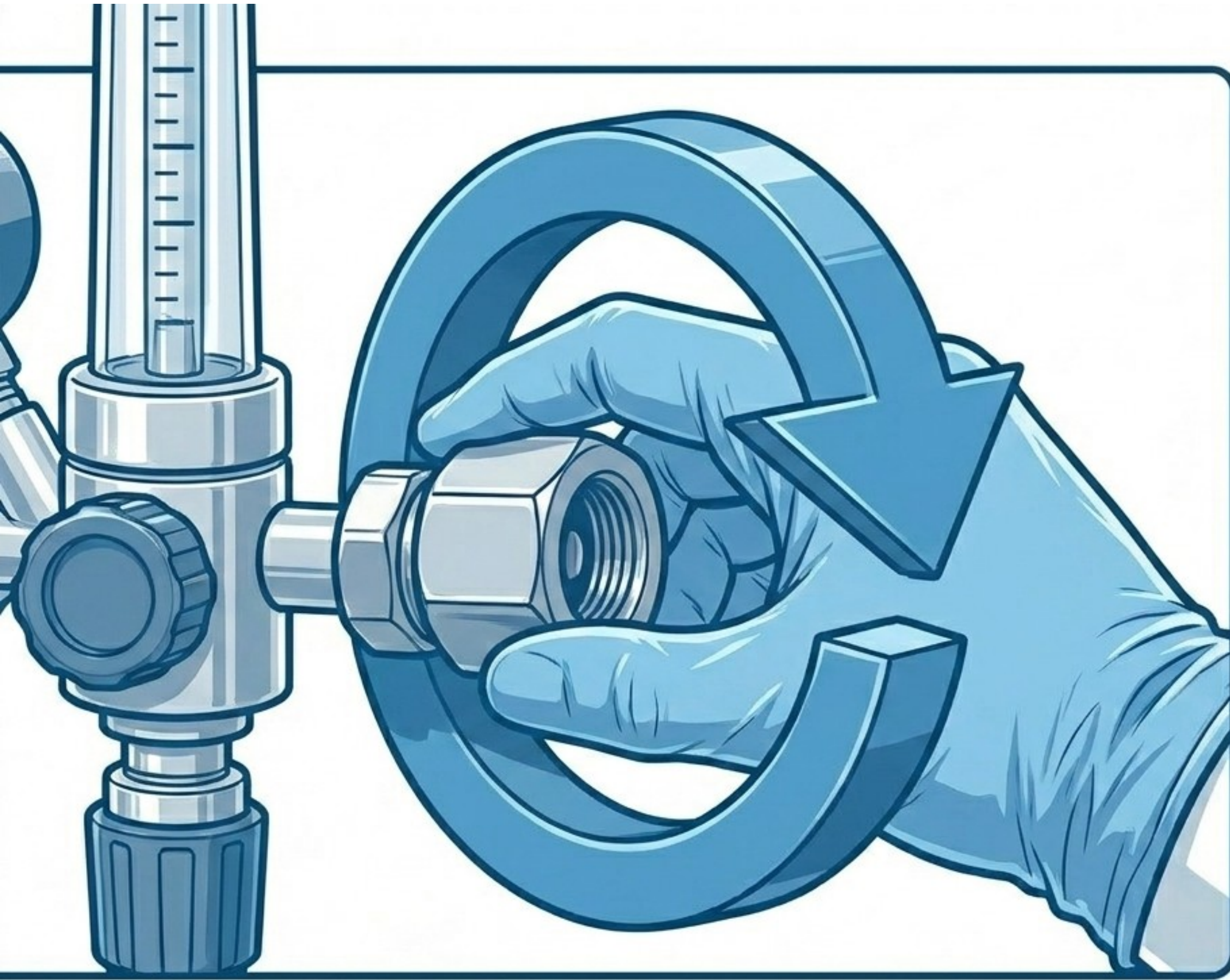


第三步： 確實鎖緊流量表

順時針方向旋轉，直到完全無法轉動為止。



必須達到「確實鎖緊」狀態，
才能進行下一步。

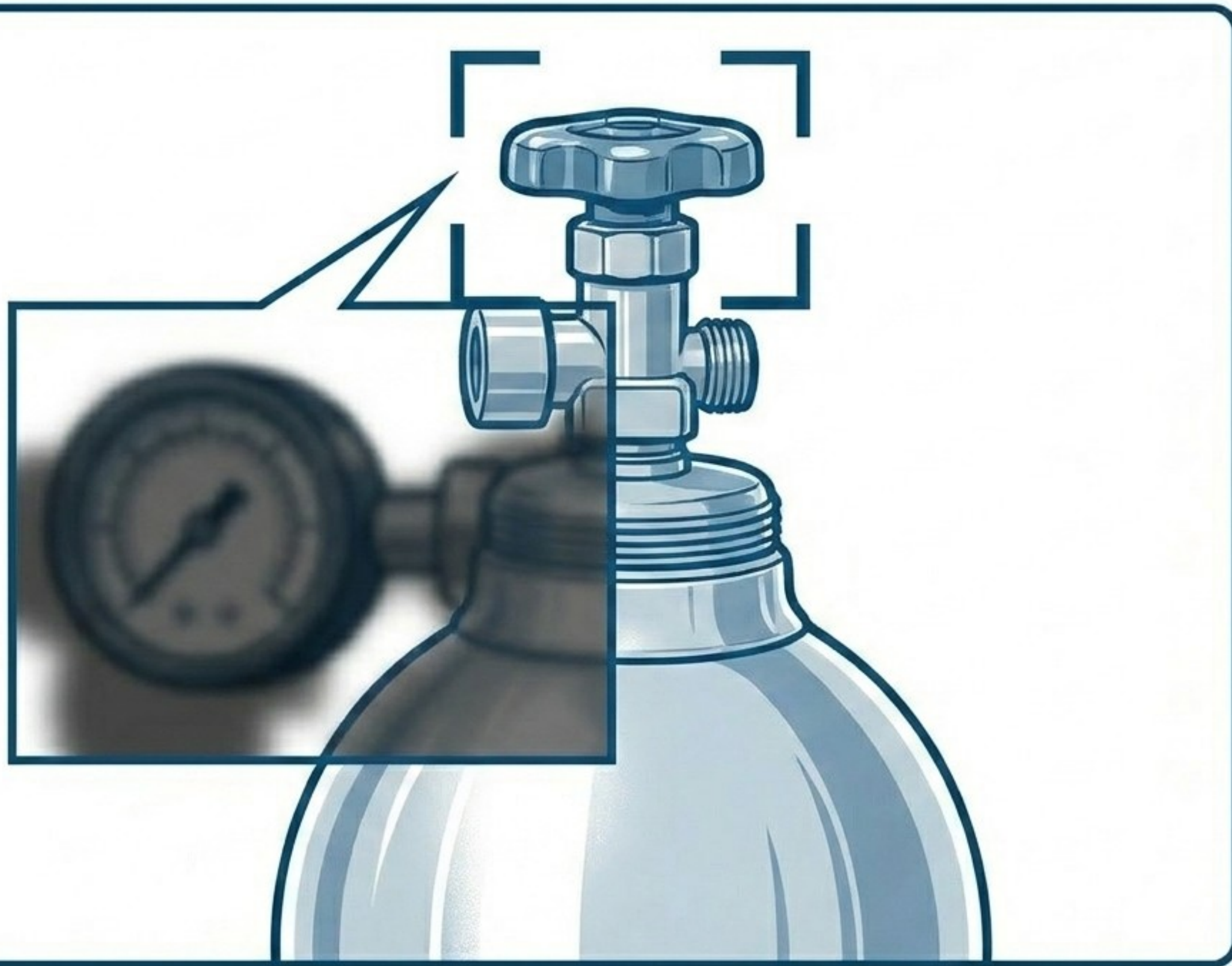

第四步： 打開主開關

緩慢打開氧氣鋼瓶頂部的
「主開關」。

（箭頭指向頂部閥門，強調這不是流量表）



第五步：開啟並調整流量

轉動正前方的流量表刻度盤。

依照醫師或護理師指示，將流量調整至正確數值。

壓力表數值判讀矩陣 (Pressure Gauge Diagnostic Matrix)

Visual	Status	Action
	正常 (Normal)	供氧充足，可安心使用。
	即將不足 (Running Low)	隨時注意，準備備用鋼瓶。
	不可使用 (Do Not Use)	壓力耗盡，嚴禁使用，立即更換！



第六步：接上氧氣耗材

將氧氣鼻管或面罩的接頭，確實套入出氧孔下方。



第七步：掛牌與靜置

一切就緒後，務必將「使用中的牌子」掛上。


供氧使用中，嚴禁移動鋼瓶！(Do not move while in use)

一分鐘快篩複習卡 (The 1-Minute Quick Review)


上工前快速記憶路徑




腳踩固定
(Foot Stabilize)

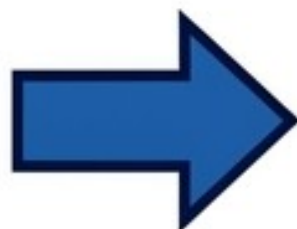

手動轉緊
(Hand Tighten)

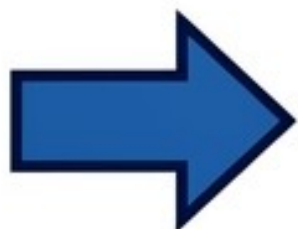

判讀綠燈
(Read Green)

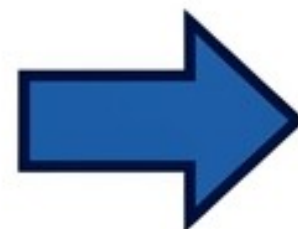

掛牌靜置
(Hang Sign & Stop)

國科會計畫 - 臨床標準作業程序 (SOP) 視覺卡完結。